

O produktu

[Návod na používání soupravy](#)

Návod na používání soupravy

ALKOHOL TEST

Souprava slouží pro jednorázové orientační zjištění alkoholu ve vydechaném vzduchu.

Postup zkoušky:

1. Odstranit obě zátky na trubičce.
2. Zásunout trubičku ALTIK do balonku a z druhé strany nasadit náustek.
3. Profouknout trubičku ALTIK jedním dechem v průběhu 20 až 40 sek. až do úplného naplnění balonku. Trubička se samovolně zahřeje.
4. Výsledek zkoušky vyhodnotit v rozmezí 1 až 2 minut



Vyhodnocení:

- Zabarvení nejtmaších zrn v náplni porovnat s etalonem na trubičce.
- Intenzita zbarvení náplně je závislá na množství alkoholu v dechu.



Upozornění:

- Každou trubičku lze použít pouze jednou.
- Bezprostředně po použití ústní vody, čištění zubů, pobytu v prostředí nasyceném parami alkoholu, po kouření, po požití likérových bombónů a zákusků, ovocných šťáv a některých léků a přípravků obsahujících alkoholy je nutno se zkouškou vyčkat 15 min.
- Pro dosažení maximální přesnosti se doporučuje minimální teplota trubičky před zkouškou +10°C □. Nerozebírejte trubičku. Při kontaktu s krystalickou náplní může dojít k zarudnutí kůže.
- Chraňte před dětmi.
- Použité trubičky ALTIK vyhoďte do běžného odpadu.
- Za nevhodné použití nebo nedodržení bezpečnostních opatření nenese výrobce nebo distributor žádnou odpovědnost.

Skladování:

- Skladovat v původních obalech, na suchém místě do +35°C, bez prudkých výkyvů teplot. Chraňte před světlem.
- Doba spotřeby trubiček ALTIK je uvedena na obalu.

[CZ](#)

[EN](#)



ALCOHOLTEST
ALTIK

.....za volant s čistým svědomím