



Instalační příručka kamery Owlet Cam

Inštaláčná príručka kamery Owlet Cam

CZ | SK

CZ


Začínáme

Stáhněte si aplikaci Owlet.



Zapojte kameru, postupujte podle pokynů aplikace a spárujte ji s účtem Owlet.

Pokud již máte aplikaci Owlet staženou, klikněte na kartu Účet a přidejte nové zařízení.

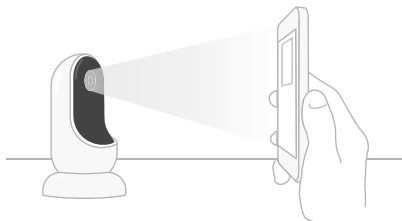

Mějte prosím na paměti, že kamera umožňuje přenos obrazu a zvuku prostřednictvím zabezpečené a zašifrované Wi-Fi sítě. Kameru připojujte pouze k soukromé síti, která je zabezpečená heslem.

Stavové kontrolky kamery Owlet Cam

- ● (bliká červeně/modře) Kameru je nyní možné spárovat s aplikací.
- (svítí červeně) Uživatel streamuje prostřednictvím aplikace.
- ● (bliká modře) Kamera se připojuje k Wi-Fi síti.
- (svítí modře) Kamera je připojena k internetu. Aplikace nestrámuje.

Zvolte požadovaný záběr


Umístěte kameru a všechny kabely do vzdálenosti 1 m od okraje postýlky. Kabely ve vzdálenosti do 1 m od okraje postýlky by měly být zakryté.

Kameru můžete nainstalovat dvěma způsoby:



① Postavte magnetickou základnu s kamerou na rovný povrch a nastavte požadovaný úhel sklonu.

② Chcete-li zabírat dětskou postýlku nebo celý pokoj z ptačí perspektivy, použijte základnu jako nástěnný držák a připevněte kameru na stěnu nad dětskou postýlku.

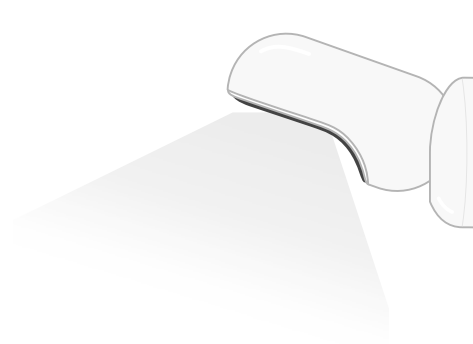

Další kroky vás provedou montáží kamery na stěnu nad postýlku.

Co naleznete v balení



Kamera Owlet Cam



Kabely s páskami Owlet*
a senzor pokojové teploty



Magnetická základna



Napájecí adaptér

Sada pro připevnění kamery na stěnu



21x kabelový
chránič

18x dlouhý chránič
1x koncovka
2x kabelový chránič ve
tvaru L



Montážní
deska



1x šroubek

Nářadí potřebné pro připevnění kamery




Metr
(není součástí balení)



Malý křížový šroubovák
(není součástí balení)

*Předchozí modely mohou obsahovat
organizér kabelů.

1. Změřte a vyznačte příslušné vzdálenosti

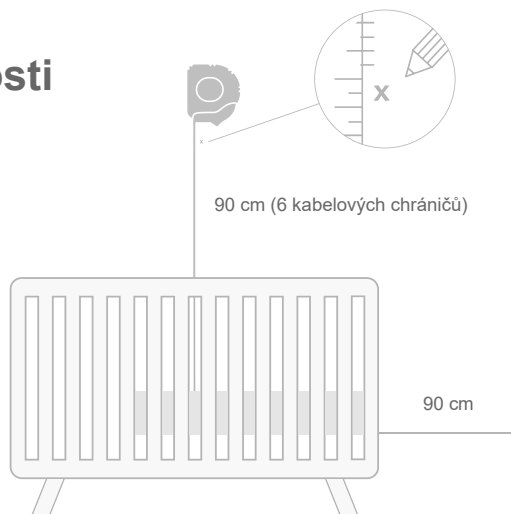


Odměřte 90 cm od horní části dětské matrace a vyznačte si na stěně místo, kde bude kamera připevněna. Tato značka by měla být nad středem postýlky, zajistíte tak optimální pozorovací úhel kamery.

Zvažte, kterou zásuvku použít. Zásuvka by měla být ve vzdálenosti alespoň 90 cm od postýlky, aby se v dosahu dítěte nenacházely žádné odkryté kabely. V dalších krocích se dozvíte, jak zakrýt všechny kabely.

Umístění teplotního senzoru je rovněž důležité. Teplotní senzor naleznete u konce chytrého kabelu na straně, která se připojuje k napájecímu adaptéru.

2. Zarovnejte a připevněte montážní desku

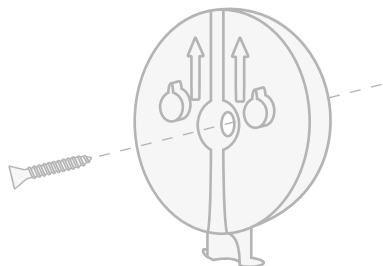


Vyrovnejte otvor ve středu montážní desky se značkou, kterou jste vyznačili na stěně. Pomocí dodaného šroubku připevněte montážní desku ke stěně tak, **aby šipky směřovaly nahoru.**

3. Odviňte kabel




Odstraňte kabelové pásky a odviňte kabel.

4. Provlákněte kabel

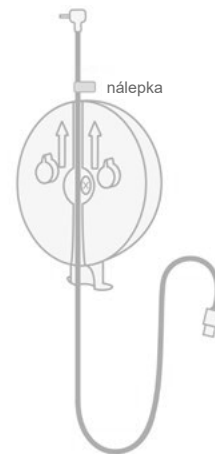


Provlákněte kabel otvorem montážní desky a zarovnejte oranžovou nálepkou na kabelu s horní částí montážní desky.

5. Namontujte základnu

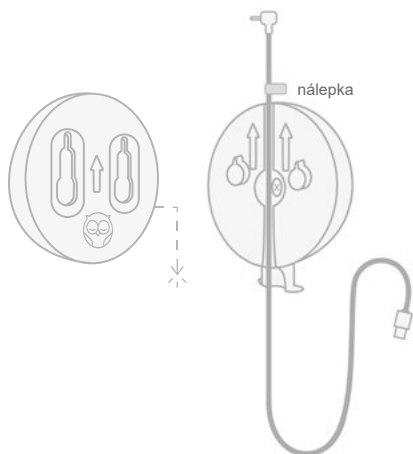

Umístěte velké otvory magnetické základny na výstupky na montážní desce a posuňte základnu směrem dolů, dokud nezacvakne na své místo.

6. Připevněte kameru

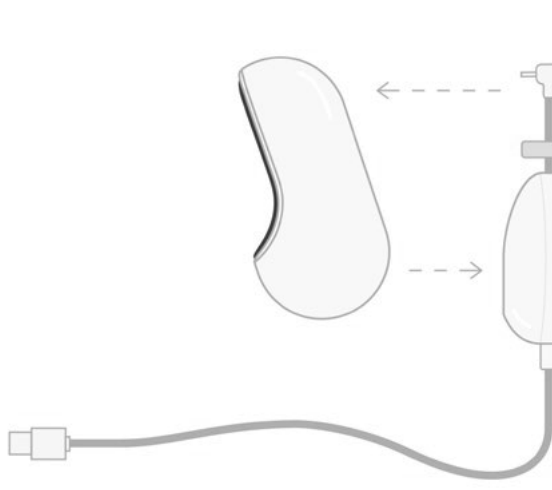


Připevněte kameru na magnetickou základnu. Zapojte do kamery kabel.

Oranžová nálepka by měla být umístěna těsně nad montážní deskou, abyste měli dostatečnou vůli kabelu pro nastavení kamery do požadovaného úhlu.

7. Nainstalujte kabelové chrániče

Kabelové chrániče se ke stěně přilepují pomocí vysokopevnostního lepidla. Při instalaci nespěchejte a pečlivě zvolte to správné umístění.

- ① Odlepte samolepicí fólii ze zadní strany dlouhého chrániče.
- ② Provlékněte kabel středem dlouhého chrániče.
- ③ Dlouhý chránič nacvakněte na spodní část montážní desky.
- ④ Pevně jej přitiskněte ke stěně.
- ⑤ Zopakujte kroky 1–4 se zbývajícimi dlouhými chrániči a zakryjte celou délku kabelu až k zásuvce.

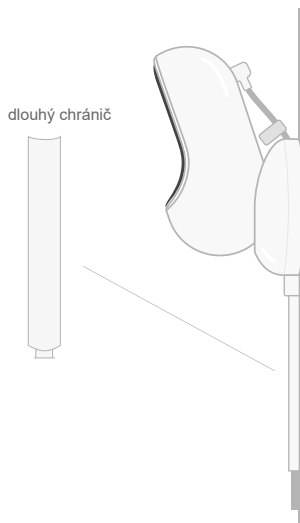


8. Kabelový chránič ve tvaru L

Pomocí pravého nebo levého kabelového chrániče ve tvaru L vedďte kabel směrem k zásuvce.

Nainstalujte další dlouhé chrániče, dokud nebudou zakryté všechny kabely ve vzdálenosti do 90 cm od okraje postýlky. Přidávejte dlouhé chrániče a zakryjte kabel až k zásuvce. Jakmile budete 15-25 cm od zásuvky, nainstalujte koncovku (následně můžete přebytečný kabel snadno svázat pomocí pásky se suchým zipem).

kabelové chrániče ve tvaru L

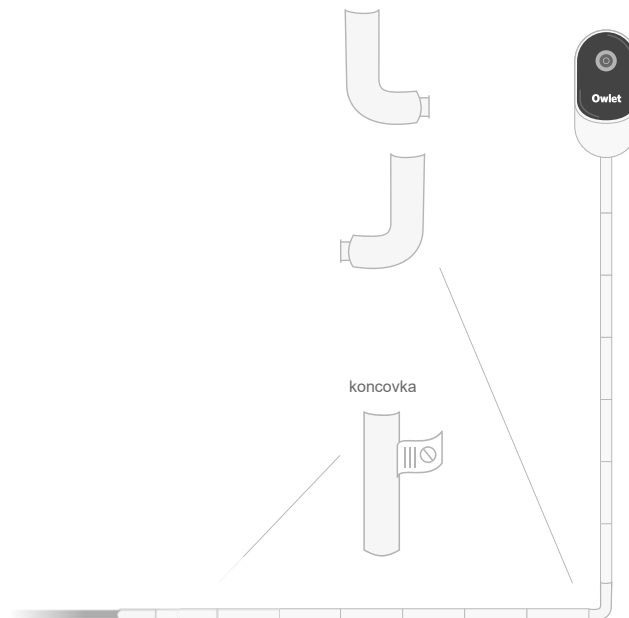


9. Zajistěte přebytečnou část kabelu páskou se suchým zipem

Smotejte přebytečnou část kabelu do volné smyčky. Provedleďte kabelovou páskou prvním otvorem a zajistěte tak horní část smyčky. Logo Owlet by mělo směřovat ven. Provedleďte kabelovou páskou druhým otvorem a připevněte tak spodní část smyčky k horní části (smyčka by nyní měla vypadat jako mašle). Zajistěte zbývající část pásky.

Jakmile řádně omotáte přebytečnou část kabelu, připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a zapojte jej do zásuvky.

Hotovo! Nyní můžete s pomocí aplikace nastavit úhel kamery, dokud nedosáhnete požadovaného záběru.

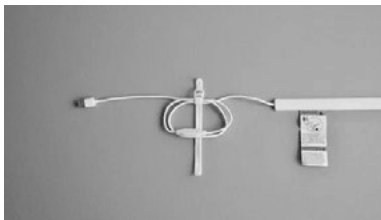

Potřebujete poradit?

Kontaktní informace pro váš region naleznete na

www.owletcare.cz



VAROVÁNÍ:



Nebezpečí uškrtení!

Děti by se mohly do kabelů zamotat a UŠKRITIT SE. Pokud výrobek používáte ve vzdálenosti 90 cm od postýlky, vždy používejte kabelové chrániče. Před každým použitím zkontrolujte, zda není kabel volně přístupný dítěti. Pokud je kabelový chránič jakkoli poškozený, okamžitě výrobek přestaňte používat. Neodstraňujte šlítek z kabelu nebo kabelového chrániče.

ČZ Varování / Důležité bezpečnostní pokyny

- **VAROVÁNÍ: Kamera Owlet Cam není zdravotnický prostředek.** Není určena k použití jako zdravotnický prostředek nebo k nahrazení zdravotnického prostředku. Neslouží a není určena k diagnostice, léčbě, ošetřování, zmírňování nebo předcházení jakýmkoli onemocněním nebo zdravotním stavům, ani k vyšetřování, nahrazování nebo úpravě anatomie nebo jakéhokoli fyziologického procesu.
- Pouze pro vnitřní použití. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, NEVYSTAVUJTE tento výrobek vodě nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE kameru v blízkosti vody (např. vany, umyvadla apod.) ani je neponožujte do vody.
- Použití kamery by nemělo nahrazovat řádný dohled dospělé osoby/rodičů. V pravidelných intervalech dítěte kontrolujte, jelikož kamera na tichou činnost dítěte neupozorní.
- NIKDY se výrobek nepokoušejte rozebírat. Vystavujete se nebezpečí a zanikne vám záruka. Uživatel by se neměl pokoušet o servis ani opravu kamery.
- Používejte pouze adaptér dodaný s tímto výrobkem. Nesprávná polarita nebo napětí adaptéru může výrobek vážně poškodit.
- Abyste zabránili zamotání a přehřátí, NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabely.
- Adaptér může být během provozu mírně teplý na dotek. To je zcela normální.
- Zkontrolujte, zda nejsou kryty zásuvek ve zdi neobvykle horké na dotek.

- Zkontrolujte, zda nejsou kryty zásuvek neobvykle horké na dotek. Pokud ano, okamžitě z těchto zásuvek odpojte kabely. Zkontrolujte, zda jsou všechna zásuvková spojení v dobrém stavu, aby se adaptér neuvolnil nebo aby nebyly odhalené kabely. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby zkontroloval, zda nejsou odhalené žádné kabely.
- NEUMISŤUJTE adaptér/zástrčku pod okno, kde by na něj dítě mohlo šlápnout a/nebo dosáhnout na potenciálně nebezpečnou část instalace.
- Montáž výrobku mohou provádět pouze dospělá osoba. Při montáži udržujte malé části výrobku mimo dosah dětí. Při vybalování výrobku dbejte zvýšené opatrnosti.
- Tento výrobek není hračka. NEDOVOLTE dětem, aby si s ním hrály.
- Kamera používá šifrovaný přenos na frekvencích v souladu s požadavky stanovené FCC. Vždy zabezpečte Wi-Fi router heslem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **VENTILACE: NEBLOKUJTE** větrací otvory výrobku. NEUMISŤUJTE jej na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. NEUMISŤUJTE jej na polici knihovny nebo skříňky, která by mohla omezovat proudění vzduchu.
- **ZDROJE TEPLA:** Kamera by měla být umístěna mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné spotřebiče, které produkují teplo. Výrobek rovněž uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.
- **OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU:** Napájecí kabel by měl být veden tak, aby na něj nemohl nikdo šlápnout a aby nebyl přiskřípnutý předměty. Zvláštní pozornost věnujte části kabelu u zástrčky a v místě, kde vychází z kamery.
- Společnost Owlet si za svými výrobky hrdě stojí. Informace o našich zárukách naleznete na webovém stránce: www.owletcare.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S FCC

- Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování

předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Používejte POUZE dodaný napájecí adaptér. V opačném případě může dojít ke zrušení naší omezené záruky. Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné budově. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může narušovat rádiovou komunikaci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S OEEZ



Společnost Owlet se zavázala plnit požadavky směrnice 2014/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Více informací o správné likvidaci výrobků Owlet v rámci Evropské unie a ve Velké Británii naleznete na našich webových stránkách.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Owlet Baby Care prohlašuje, že kamera Owlet Cam je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové stránce: www.owletcare.cz

FREKVENČNÍ ROZSAH A MAXIMÁLNÍ VÝKON 2 412-2 472 MHz (výstupní výkon 0,0249 W)

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC a vyhovuje bezlicenčním kanadským RSS bez výjimek pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Americký patent č. D864147 a D864148. Další patenty v řízení.

Vyrobeno v Číně.



Informace o záruce

Společnost Owlet poskytuje záruku kamery Owlet Cam při běžném používání a servisu bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu, který je uveden na dokladu o koupi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Owlet Cam a aplikace Owlet mají sloužit jako pomůcky při péči o dítě a nejsou určeny k tomu, aby nahradily nebo se používaly bez dohledu zodpovědné dospělé osoby.

Kamera Owlet Cam je určena pro zdravé děti a prahové hodnoty pro spuštění alarmu na kameře Owlet Cam proto nejsou tak přesné jako u lékařských monitorů.

Upozornění:

- Nepoužívejte Owlet Cam jako diagnostický nástroj.
- Nepoužívejte Owlet Cam pokud vám lékař doporučí použití nemocničního pulzního oxymetru.
- Nepoužívejte Owlet Cam, pokud vám lékař doporučí použití nemocničního monitoru zástavy dechu.
- Nepoužívejte Owlet Cam jako výmluvu pro nebezpečné spánkové návyky.

PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD K POUŽITÍ

V návodu k použití naleznete mnoho užitečných rad, jak Owlet Cam správně používat a udržovat. Řešení některých problémů naleznete v sekci Řešení problémů. Pokud si nejprve přečtete tipy pro řešení problémů, možná se na nás nebudete muset obracet s žádostí o pomoc. Kompletní informace o nastavení a používání výrobku naleznete na webových stránkách www.owletcare.cz.

PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vaše bezpečnost i bezpečnost jiných osob je pro nás velmi důležitá. V tomto návodu a v aplikaci Owlet Baby Care naleznete mnoho důležitých bezpečnostních pokynů. Vždy si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je.



Tento symbol v tomto návodu k použití upozorňuje na důležité bezpečnostní informace!

Všechny bezpečnostní informace budou následovány výstražným symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“, „POZOR“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:

NEBEZPEČÍ = Bezprostředně hrozící nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.

VAROVÁNÍ = Potenciálně nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob a/nebo poškození majetku.

POZOR = Bezprostředně hrozící nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.

UPOZORNĚNÍ = Nebezpečná situace, která by mohla vést k jiným následkům než zranění osob, např. poškození majetku.

VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



VAROVÁNÍ: Owlet Cam není zdravotnický prostředek.

Owlet Cam vás upozorní, pokud se teplota frekvence nebo hladina kyslíku v krvi vašeho dítěte pohybují mimo stanovený rozsah. Owlet Cam je určena pro novorozence do osmnácti (18) měsíců, nikoli pro děti starší osmnácti (18) měsíců. Owlet Cam není zdravotnický prostředek.

Owlet Cam:

- Není určena k diagnostice, léčbě, zmiřování, monitorování, léčení ani předcházení jakéhokoli onemocnění nebo zranění.
- Neovlivňuje funkci nebo strukturu těla.
- Nedosahuje primárních určených účelů prostřednictvím působení chemických látek.
- Nezabraňuje syndromu náhlého úmrtí kojenců (SNŮK).

Primárním účelem tohoto návodu k použití je: Poskytnout uživateli základní pokyny a doporučení pro správnou instalaci a používání Owlet Cam a vysvětlit funkce, obsluhu, bezpečnostní opatření, údržbu a řešení problémů s Owlet Cam. Je nezbytné, aby si všechny osoby, které mají tuto Owlet Cam používat nebo nastavovat, pečlivě přečetly návod k použití, aby pochopily, jak Owlet Cam správně používat, a aby tyto pokyny dodržovaly.

Pokud těmto pokynům nerozumíte, neprodleně nás kontaktujte na emailové adrese:
info@owlet-care.cz

PRO BEZPEČNOST VÁS A VAŠEHO DÍTĚTE



- ZÁKLADNU VĚDY UDRŽUJTE VE VZDÁLENOSTI ALESPŮN 1 METRU OD DĚTSKÉ POSTÝLKY. JELIKOŽ KABEL MŮŽE PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ.
- OWLET CAM JE POUZE POMŮCKOU. NENAHRAZUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.
- U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ, DĚTÍ NA PODPŮRNĚM KYSLÍKU NEBO DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZKONZULTUJTE POUŽITÍ CHYTRÉ PONOŽKY SMART SOCK 3 OD OWLET S VAŠÍM LÉKÁŘEM.
- KDYKOLI SE OZVE ALARM, OKAMŽITĚ ZAREAGUJTE.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S FCC



Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Používejte POUZE dodaný napájecí adaptér. V opačném případě může dojít ke zrušení naší omezené záruky. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné budově. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může narušovat rádiovou komunikaci.



Toto zařízení vyhovuje bezlicenčním kanadským RSS bez výjimek pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Reklama a servis

Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
190 00 Praha 9

Informace

email: info@irobot.cz
telefon: +420 245 001 740

Otevírací doba

Pondělí - Pátek: 7.30 - 15.30

Řešení problémů

Počáteční nastavení | Alarmy | Připojení

Počáteční nastavení

Problém	Příčiny	Řešení
<ul style="list-style-type: none">■ Během nastavení nevidím Wi-Fi síť chytré ponožky Smart Sock 3.	<ul style="list-style-type: none">■ Základna není zapnutá.■ Základna je již připojena k Wi-Fi síti chytré ponožky Smart Sock 3.■ Základna je mimo dosah.	<ul style="list-style-type: none">■ Zapojte základnu do zásuvky.■ Zkontrolujte, zda kontrolka Wi-Fi sítě na spodní straně základny svítí. Pokud ano, tento krok přeskočte a pokračujte v založení vašeho účtu v aplikaci.■ Umístěte základnu blíže k vašemu Wi-Fi routeru.
<ul style="list-style-type: none">■ V aplikaci Owlet nevidím naši domácí Wi-Fi síť.	<ul style="list-style-type: none">■ Váš router využívá frekvenční pásmo 5 GHz (výrobek Owlet podporuje pouze 2,4GHz pásmo).■ Možná máte skrytý router.	<ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte, zda je zařízení iOS připojeno k 2,4GHz síti (většina 5GHz routerů podporuje i 2,4GHz síť).■ Pokyny týkající se skrytých routerů naleznete na owletcare.com/support.
<ul style="list-style-type: none">■ Základnu nelze připojit k naší domácí Wi-Fi síti.	<ul style="list-style-type: none">■ Nesprávné heslo■ Základna je mimo dosah vašeho Wi-Fi routeru.■ Vaše domácí Wi-Fi síť nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte heslo k vaší síti.■ Před nastavením umístěte základnu blíže k routeru a po dokončení nastavení základnu odnesete zpět do dětského pokoje.■ Zkuste restartovat telefon a znovu se připojit k Wi-Fi síti.■ Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none">■ Základna po odpojení chytré ponožky Smart Sock svítí bíle.	<ul style="list-style-type: none">■ Probíhá aktualizace softwaru.	<ul style="list-style-type: none">■ Připojte chytrou ponožku Smart Sock zpět k základně, dokud nebude aktualizace dokončena.
<ul style="list-style-type: none">■ Základnu nelze spárovat s mým účtem Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Základna a vaše zařízení iOS nejsou připojeny ke stejné Wi-Fi síti.■ Podržení malého tlačítka Registrace	<ul style="list-style-type: none">■ Ověřte, zda jsou základna a vaše zařízení iOS připojeny ke stejné Wi-Fi síti.■ Stiskněte a uvolněte (nedržte) malé tlačítko Registrace na spodní straně základny a počkejte několik sekund, než se znovu pokusíte spárovat váš účet Owlet.■ Připojte vaše zařízení iOS ke stejné 2,4GHz Wi-Fi síti, ke které je připojena základna.

*Potřebujete technickou podporu? Kontaktujte nás na emailové adrese info@owlet-care.cz

Alarmy

Problém	Příčiny	Řešení
<ul style="list-style-type: none">■ Základna bliká modře a pípá.	<ul style="list-style-type: none">■ Základna je mimo dosah chytré ponožky Smart Sock.■ Tělo rodiče či jiné osoby starající se o miminko blokuje spojení mezi chytrou ponožkou Smart Sock a základnou. To se běžně stává při krmení, výměně plenek, mazlení apod.■ Slabá nebo vybitá baterie	<ul style="list-style-type: none">■ Umístěte základnu blíže k chytré ponožce Smart Sock.■ Změňte polohu miminka nebo zvažte, zda při krmení, výměně plenek, mazlení apod. monitorování nevypnout.■ Nabijte chytrou ponožku Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none">■ Základna bliká červeně a pípá.	<ul style="list-style-type: none">■ Nízká nebo vysoká tepová frekvence■ Nízká hladina kyslíku■ Chytrá ponožka Smart Sock na nožičce nesedí.	<ul style="list-style-type: none">■ Ujistěte se, že obrys senzoru na vnější straně chodidla miminka je 1-2 mm za malíčkem.■ Ujistěte se, že chytrá ponožka Smart Sock přiléhá k nožičce (pokud ne, chytrá ponožka obtížně získává údaje. Může se rovněž zbytečně spustit alarm.)■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnaný v okénkách látkové ponožky.■ Zvažte, zda nepoužít jinou velikost látkové ponožky.
<ul style="list-style-type: none">■ Základna bliká žlutě a pípá.	<ul style="list-style-type: none">■ Problémy se získáváním údajů■ Chytrá ponožka Smart Sock není správně nasazena.■ Světlo v místnosti je příliš jasné.	<ul style="list-style-type: none">■ Ujistěte se, že obrys senzoru na vnější straně chodidla miminka je 1-2 mm za malíčkem.■ Ujistěte se, že chytrá ponožka Smart Sock přiléhá k nožičce (pokud ne, chytrá ponožka obtížně získává údaje a může se rovněž zbytečně spustit alarm).■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnaný v okénkách látkové ponožky.■ Ztlumte světlo v místnosti.

Připojení

Problém	Příčiny	Řešení
<ul style="list-style-type: none">■ Základna není připojena k internetu.	<ul style="list-style-type: none">■ Základna je mimo dosah vašeho Wi-Fi routeru.■ Vaše domácí Wi-Fi síť nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">■ Umístěte základnu a Wi-Fi router blíže k sobě (zesilovače Wi-Fi ani další routery problém nevyřeší).■ Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none">■ Chytrá ponožka Smart Sock se nenabíjí.	<ul style="list-style-type: none">■ Chytrá ponožka Smart Sock není úplně zapojena.■ Chytrá ponožka Smart Sock vyžaduje resetování.	<ul style="list-style-type: none">■ Nechte chytrou ponožku Smart Sock nabíjet, dokud neustýšíte cvaknutí a nezačne zeleně blikat.■ Vypněte a znovu zapněte elektronickou součástku chytré ponožky Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none">■ Místo údajů o tepové frekvenci a hladině kyslíku jsou vidět pomlčky.	<ul style="list-style-type: none">■ Chytrá ponožka Smart Sock se snaží získat spolehlivý údaj.■ Miminko příliš pohybuje nožičkou.■ Špatně nasazená chytrá ponožka Smart Sock■ Špatně padnoucí látková ponožka	<ul style="list-style-type: none">■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnané ve středu okének látkové ponožky.■ Nedávajte dítě do kolečky ani na vibrační podložky, protože by mohly narušit správnou funkci zařazení.■ Zkontrolujte, zda je chytrá ponožka Smart Sock správně nasazená.■ Zkontrolujte, zda jste použili vhodnou velikost látkové ponožky.

Tipy pro zdravé prostředí pro spánek

Rádi bychom se s vámi podělili o několik tipů, jak vašemu miminku zajistit zdravý a bezpečný spánek.

- Miminko by mělo být v postýlce samotné a ležet na zádech. Spaní na boku nebo na bříše není pro miminka bezpečné.
- Pořídte pro miminko postýlku, která splňuje platné bezpečnostní normy. Rovněž zakupte pevnou matraci, která do postýlky dobře padne a povlečte ji dobře přiléhajícím prostěradlem.
- Do postýlky neumísťujte žádné měkké, volně ležící nebo načechrané předměty. To zahrnuje polštáře, deky, přikrývky, ochranné obložení do dětských postýlek, plyšáky, hračky a jakékoli jiné měkké předměty.
- Místo klasické přikrývky použijte kojeneckou přikrývku, kterou je možné zapnout jako oděv, nebo podobnou přikrývku, která vaše miminko udrží v teple a bezpečí.
- Sdílejte s vaším miminkem pokoj, ale ne postel. Vaše miminko by mělo spát v oddělené postýlce blízko vaší postele. Bude tak v bezpečí a krmení bude snazší. Pokud by miminko spalo s vámi, chytrá ponožka Smart Sock nebude správně fungovat. Vaše tělo by totiž rušilo bezdrátový signál ponožky.
- Dbejte na to, abyste s miminkem neusnuli ve vaší posteli, na pohovce nebo v křesle.
- Nikdy nenechávejte miminko spát na měkkých površích, jako jsou postele pro dospělé nebo pro děti, pohovky, křesla, vodní postele, polštáře, polštářky, přikrývky, ovčí kůže a podobné předměty.
- Nepoužívejte polštáře, polohovací klíny ani fixační podložky, abyste miminko podepřeli, udrželi na zádech nebo mu zabránili v otočení.
- Dbejte na to, aby se miminko nadměrně nezahřálo. Oblékejte jej do lehkého pyžámka a v místnosti udržujte teplotu, která je příjemná pro lehce oblečeného dospělého.
- Zvažte, zda miminku během odpoledního a večerního spánku nenabídnout dudlík. Kojencům dudlík nabídněte až ve věku 3–4 týdnů, až si zvyknou na kojení.
- Pouchte o těchto zásadách bezpečného spánku všechny, kdo se o vaše miminko starají!



Prohlášení o shodě

Výrobce: *Owlet Baby Care*
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043
Telefon: 844.334.5330

Výrobek: Owlet Cam
Číslo výrobku: OC1B

Popis výrobku: Owlet Cam umožňuje sledovat a slyšet dítě. Zařízení obsahuje: kameru s vysokým rozlišením a širokým úhlem záběru a zabudovaným mikrofonem, umožňuje obousměrný přenos zvuku, noční vidění, má senzor na měření teploty v místnosti. Balení dále obsahuje magnetickou základnu, napájecí adapter, USB kabel s teplotním senzorem, sadu pro připevnění na stěnu a chrániče na kabely.

Název zástupce: Obelis S.A

Adresa registrovaného zástupce:

Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.
Tel: 32 (0) 2 732 5954
Fax: 32 (0) 2 732 60 03
Email: mail@obelis.net
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení Owlet Baby Care of Lehi, Utah, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
 - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
 - Council Directive 20 1/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
 - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
 - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001)– General Product Safety
 - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021

Tammy Lavery

Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs

SK


Začíname

Stiahnite si aplikáciu Owlet.



Zapojte kameru, postupujte podľa pokynov aplikácie a spárujte ju s účtom Owlet.

Keď aplikáciu Owlet máte už stiahnutú, kliknite na kartu Účet a pridajte nové zariadenie.

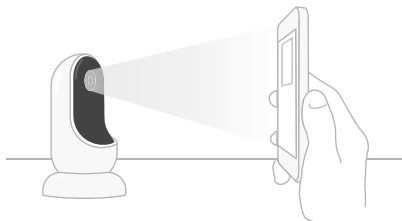

Majte prosím na pamäti, že kamera umožňuje prenos obrazu a zvuku prostredníctvom zabezpečenej a zašifrovanej Wi-Fi siete. Kameru pripájajte iba k súkromnej sieti, ktorá je zabezpečená heslom.

Stavové kontrolky kamery Owlet Cam

- ● (bliká červeno/modro) Kameru teraz môžete spárovať s aplikáciou.
- (svieti červeno) Používateľ streamuje prostredníctvom aplikácie.
- ● (bliká modro) Kamera sa pripája k Wi-Fi sieti.
- (svieti modro) Kamera je pripojená k internetu. Aplikácia nestreamuje.

Zvoľte požadovaný záber


Kameru a všetky káble umiestnite do vzdialenosti 1 m od okraja postelky. Káble vo vzdialenosti do 1 m od okraja postelky by mali byť zakryté.

Kameru môžete inštalovať dvoma spôsobmi:



① Magnetickú základňu s kamerou postavte na rovný povrch a nastavte požadovaný uhol sklonu.

② Ak chcete zaberat' detskú postelku alebo celú izbu z vtáčej perspektívy, základňu použite ako nástenný držiak a kameru pripevnite na stenu nad detskú postelku.

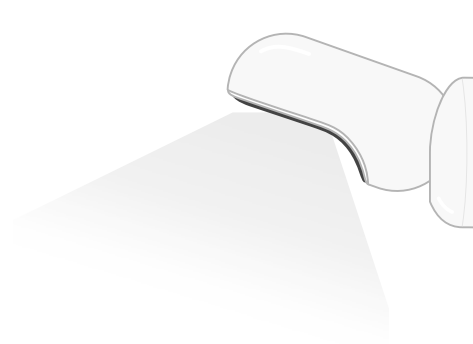

Ďalšie kroky vás povedú montážou kamery na stenu nad postelkou.

Čo nájdete v balení



Kamera Owlet Cam



Káble s páskami Owlet*
a senzor izbovej teploty




Magnetická základňa




Napájací adaptér

Súprava pre pripevnenie kamery na stenu

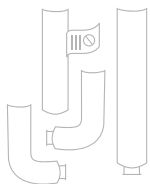

21x káblový chránič
18x dlhý chránič
1x koncovka
2x káblový chránič tvaru L

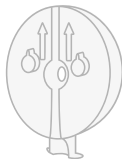

Montážna doska



1x skrutka

Náradie potrebné pre pripevnenie kamery




Meter
(nie je súčasťou balenia)



Malý krížový skrutkovač
(nie je súčasťou balenia)

*Predošlé modely môžu obsahovať organizér káblov.

1. Zmerajte a vyznačte príslušné vzdialenosti

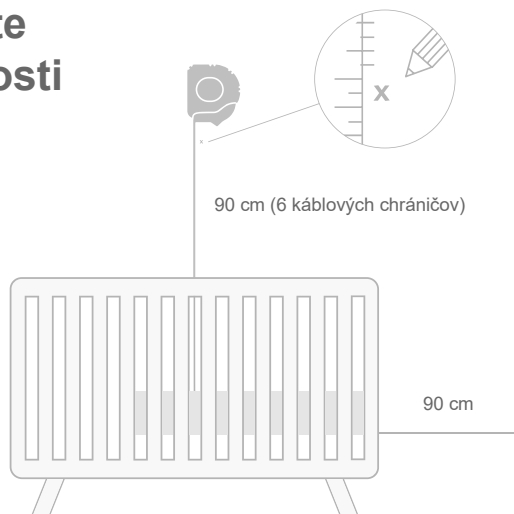


Odmerajte 90 cm od hornej časti detského matraca a na stene si vyznačte miesto, kde bude kamera pripevnená. Táto značka by mala byť nad stredom postelky, zaistíte tak optimálny pozorovací uhol kamery.

Zvážte, ktorú zásuvku použiť. Zásuvka by mala byť vo vzdialenosti aspoň 90 cm od postelky, aby sa v dosahu dieťaťa nenachádzali žiadne odkryté káble. V ďalších krokoch sa dozviete, ako zakryť všetky káble.

Umiestnenie teplotného senzora je tiež dôležité. Teplotný senzor nájdete na konci inteligentného kábla na strane, ktorá sa pripája k napájaciemu adaptéru.

2. Zarovnajte a pripevnite montážnu dosku

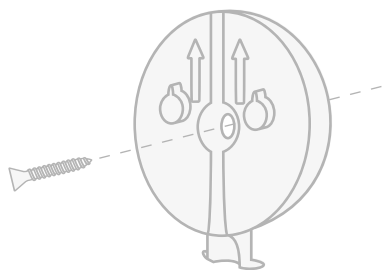


Otvor v strede montážnej dosky vyrovnajte so značkou, ktorú ste vyznačili na stene. Dodanú skrutku pripevnite montážnu dosku k stene tak, **aby šípky smerovali nahor.**

3. Odviňte kábel




Odstráňte káblové pásy a odviňte kábel.

4. Preveďte kábel

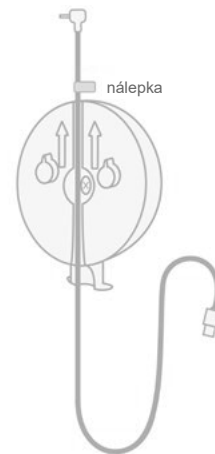


Kábel prevlečte cez otvor montážnej dosky a oranžovú nálepku na kábli zarovnajte s hornou časťou montážnej dosky.

5. Namontujte základňu 6. Pripevnite kameru

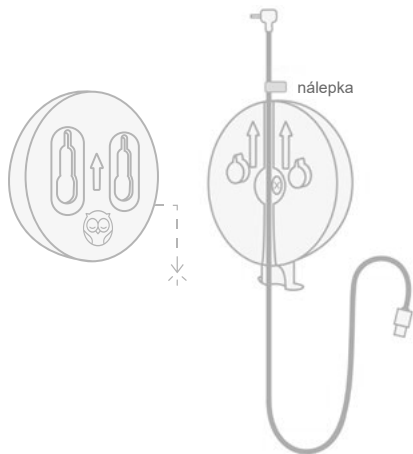

Veľké otvory magnetickej základne umiestnite na výstupky na montážnej doske a základňu posúvajte smerom dolu, dokým nezacvakne na svoje miesto.

Kameru pripevnite na magnetickú základňu. Do kamery zapojte kábel.

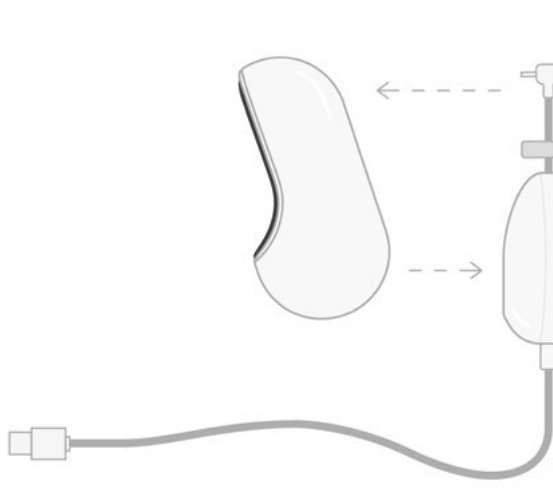


Oranžová nálepka by mala byť umiestnená tesne nad montážnou doskou, aby ste mali dostatočnú vôľu kábla pre nastavenie kamery do požadovaného uhla.

7. Nainštalujte káblové chrániče

Káblové chrániče sa k stene prilepujú vysokopevnostným lepidlom. Pri inštalácii sa neponáhľajte a dobre zvolte správne umiestnenie.


- ① Odlepte samolepiacu fóliu zo zadnej strany dlhého chrániča.
- ② Kábel prevlečte cez stred dlhého chrániča.
- ③ Dlhý chránič zacvaknite na spodnú časť montážnej dosky.
- ④ Pevne ho pritlačte ku stene.
- ⑤ Kroky 1 až 4 zopakujte so zvyšnými dlhými chráničmi a zakryte celú dĺžku kábla až k zásuvke.

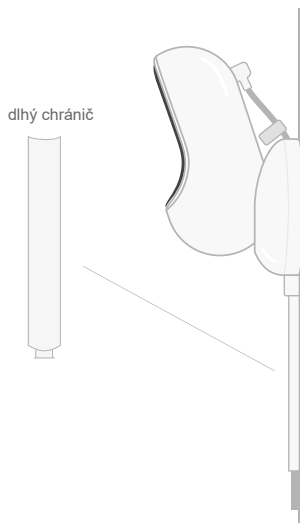

8. Káblový chránič tvaru L

Pomocou pravého alebo ľavého káblového chrániča tvaru L vedte kábel smerom k zásuvke.

Nainštalujte ďalšie dlhé chrániče, dokým nebudú zakryté všetky káble nachádzajúce sa do 90 cm od okraja postieľky. Pridávajte dlhé chrániče a kábel zakryte až k zásuvke. Keď budete 15-25 cm od zásuvky, nainštalujte koncovku (potom môžete prebytočný kábel ľahko zviazať páskou so suchým zipsom).

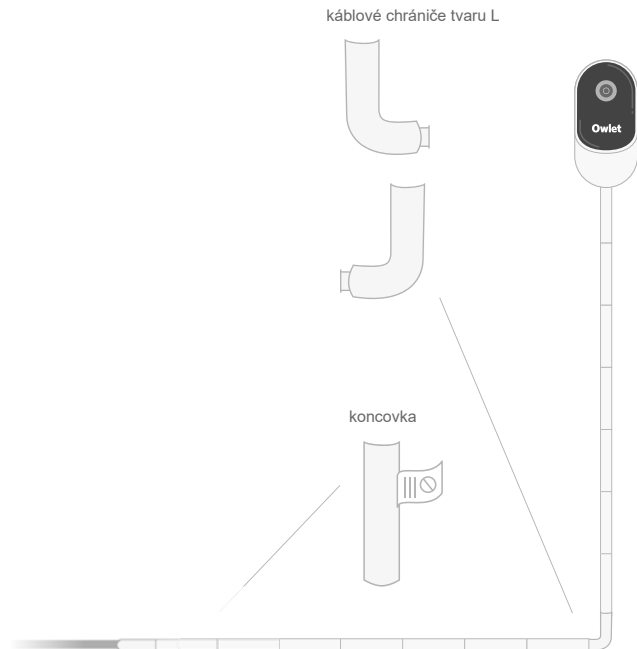


9. Prebytočnú časť kábla zaistíte páskou so suchým zipsom

Prebytočnú časť kábla zmotajte do voľného uzla. Káblovú pásku prevlečte cez prvý otvor, čím zaistíte hornú časť uzla. Logo Owlet by malo smerovať von. Káblovú pásku prevlečte cez druhý otvor, čím pripevníte spodnú časť uzla k hornej časti (uzol by teraz mal vyzerať ako mašľa). Zaistíte zostávajúcu časť pásky.

Keď dobre omotáte prebytočnú časť kábla, napájací kábel pripojte k napájaciemu adaptéru a zapojte ho do zásuvky.


Hotovo! Teraz môžete pomocou aplikácie nastaviť uhol kamery, dokým nedosiahnete požadovaný záber.

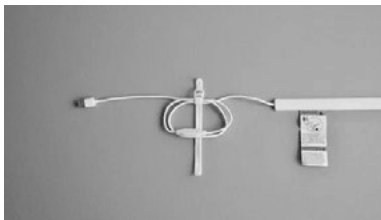


Potrebuje poradit'?

Kontaktné informácie pre váš región nájdete na

www.owletcare.sk



VAROVANIE:



Nebezpečenstvo uškrtenia!

Deti by sa mohli do káblov zamotať a UŠKRTIŤ SA. Ak výrobok používate do 90 cm od postelky, vždy používajte káblové chrániče. Pred každým použitím skontrolujte, či kábel nie je voľne prístupný dieťaťu. Keď je káblový chránič akokoľvek poškodený, výrobok okamžite prestaňte používať. Neodstraňujte štítok z kábla ani z káblového chrániča.

SK Varovanie / Dôležité bezpečnostné informácie

- **VAROVANIE:** Kamera Owlet Cam nie je zdravotnícka pomôcka. Nie je určená na používanie ako zdravotnícka pomôcka ani na nahrádzanie zdravotníckej pomôcky. Neslúži a nie je určená na diagnostiku, liečenie, ošetrovanie, zmiernenie ani na predchádzanie žiadnych chorôb ani zdravotných stavov, ani na vyšetrenie, nahradenie alebo úpravu anatómie alebo iného fyziologického procesu.
- Iba pre použitie v interiéri. Aby ste znížili riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom, NEVYSTAVUJTE tento výrobok vode ani vlhkosti. Kameru NEPOUŽÍVAJTE blízko vody (napr. vane, umývadla a pod.), ani ju neponárajte do vody.
- Použitie kamery by nemalo nahrádzať riadny dohľad dospelých osôb/rodičov. V pravidelných intervaloch dieťa kontrolujte, pretože kamera nedokáže upozorniť na tichú činnosť dieťaťa.
- NIKDY sa výrobok nepokúšajte rozoberať. Vystavujete sa nebezpečenstvu a zranenie vám záruka. Používateľ by sa nemal pokúšať o servis ani opravu kamery.
- Používajte iba adaptér dodaný s týmto výrobkom. Nesprávna polarita alebo napätie adaptéra môže výrobok vážne poškodiť.
- Aby ste zabránili zamotaniu a prehriatiu, NEPOUŽÍVAJTE predžovacie káble.
- Adaptér môže byť počas činnosti zariadenia mierne teplý na dotyk. To je úplne normálne. Skontrolujte, či kryty zásuviek v stene nie sú neobvykle horúce na dotyk.

• Skontrolujte, či kryty zásuviek nie sú neobvykle horúce na dotyk. Ak áno, káble z týchto zásuviek okamžite odpojte. Skontrolujte, či všetky zásuvkové spojenia sú v dobrom stave, aby sa adaptér neuvolnil alebo aby neboli odhalené káble. Požadajte kvalifikovaného elektrikára, aby skontroloval, či nie sú odhalené žiadne káble.

- Adaptér/zástrčku NEUMIESTŇUJTE pod okno, kde by na ne mohlo šliapnúť alebo dosiahnuť dieťa ako na potenciálne nebezpečnú časť inštalácie.
- Montáž výrobku môžu robiť iba dospelé osoby. Pri montáži udržiavajte malé časti výrobku mimo dosahu detí. Pri rozbaľovaní výrobku buďte veľmi opatrní.
- Tento výrobok nie je hračka. NEDOVOLTE deťom, aby sa s ním hrali.
- Kamera používa šifrovaný prenos na frekvenciách v súlade s požiadavkami stanovenými FCC. Wi-Fi router vždy zabezpečte heslom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **VENTILÁCIA:** NEBLOKUJTE vetracie otvory výrobku. Výrobok NEUMIESTŇUJTE na posteľ, pohovku, koberec ani podobný povrch. Výrobok NEUMIESTŇUJTE na policiu knižnice ani na skrinky, lebo by mohlo byť obmedzené prúdenie vzduchu.
- **ZDROJE TEPLA:** Kamera by mala byť umiestnená mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, výhrevné telesá, kachle a iné spotrebiče, ktoré produkujú teplo. Výrobok udržiavajte mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- **OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA:** Napájací kábel by mal byť vedený tak, aby na neho nikto nešliahol a aby nebol priškrpnutý predmetmi. Zvláštnu pozornosť venujte časti kábla pri zástrčke a na mieste, kde vychádza z kamery.
- Spoločnosť Owlet si za svojimi výrobkami hrdlo stojí. Informácie o našich zárukách nájdete na webovej stránke: www.owletcare.sk

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC

• Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný

napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej budove. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.



VYHLÁSENIE O ZHODE S OEEZ

Spoločnosť Owlet sa zaviazala plniť požiadavky smernice 2014/19/ EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Viac informácií o správnej likvidácii výrobkov Owlet v rámci Európskej únie a vo Veľkej Británii nájdete na našich webových stránkach.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Owlet Baby Care vyhlasuje, že kamera Owlet Cam je v súlade so smernicou 2014/53/ EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: www.owletcare.sk

FREKVENČNÝ ROZSAH A MAXIMÁLNY VÝKON 2 412-2 472 MHz (výstupný výkon 0,0249 W)

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC a vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Americký patent č. D864147 a D864148. Prebieha konanie o udelení ďalších patentov.

Vyrobené v Číne.



Informácie záruke

Spoločnosť Owlet zaručuje, že Owlet Cam nebude pri bežnom používaní a údržbe vykazovať chyby materiálu ani spracovania po dobu (2) rokov od dátumu nákupu, ktorý je uvedený na doklade o nákupe.

Owlet Cam a aplikácia Owlet majú slúžiť ako pomôcky pri starostlivosti o dieťa a nie sú určené na to, aby nahradili dohľad alebo sa používali bez dohľadu zodpovednej dospeléj osoby.

Owlet Cam je určená pre zdravé deti, preto prahové hodnoty pre spustenie alarmu na Owlet Cam nie sú také prísne ako u lekárskeho monitora.

Upozornenie:

- Inteligentnú Owlet Cam nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte Owlet Cam, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter.
- Nepoužívajte Owlet Cam, ak vám lekár odporučil používať lekársky monitor dychu.
- Owlet Cam nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE

V návode na používanie nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a starať sa o Owlet Cam. Riešenie niektorých problémov nájdete v sekcii Riešenie problémov. Ak si najprv prečítate tipy na riešenie problémov, možno sa na nás nebudete musieť obrátiť so žiadosťou o pomoc. Kompletné informácie o nastavení a používaní výrobku nájdete na webovej stránke www.owletcare.sk.

PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich.



Tento symbol v tomto návode na používanie upozorňuje na dôležité bezpečnostné informácie!

Všetky bezpečnostné informácie budú nasledované výstražným symbolom a slovom „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“, „POZOR“ alebo „UPOZORNENIE“. Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEČENSTVO = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

VAROVANIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

POZOR = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

UPOZORNENIE = Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k iným následkom ako zraneniu osôb, napr. k poškodeniu majetku.

VAROVANIE A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Owlet Cam nie je zdravotnícka pomôcka.



Owlet Cam vás upozorní, ak pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka v krvi dieťaťa sú mimo stanoveného rozsahu. Owlet Cam je určená pre novorodencov do osemnásť (18) mesiacov, nie pre deti staršie ako osemnásť (18) mesiacov. Owlet Cam nie je zdravotnícka pomôcka. Owlet Cam:

- Nie je určená na diagnostiku, liečbu, zmeriavanie, monitorovanie, liečenie ani predchádzanie žiadnej choroby ani zranenia.
- Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela.
- Primárne určený účel nedosahuje pôsobením chemických látok.
- Nezabraňuje syndrómu náhleho úmrtia novorodencov (SNÚK).

Prímárym účelom tohto návodu na používanie je: Používateľovi poskytnúť základné pokyny a rady pre správnu inštaláciu a používanie Owlet Cam a vysvetliť funkcie, obsluhu, bezpečnostné opatrenia, údržbu a riešenie problémov s Owlet Cam. Je nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré majú túto Owlet Cam používať alebo nastavovať, si pozorne prečítali návod na používanie, aby pochopili, ako Owlet Cam správne používať, a aby tieto pokyny dodržiavali.

Ak týmito pokynom nerozumiете, ihneď nás kontaktujte na e-mailovej adrese:
info@owlet-care.sk

PRE BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO DIEŤAŤA



- ZÁKLADNÚ VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIEĽKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENAŤ NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA.
- INTELIGENTNÁ PONOŽKA SMART SOCK 3 OD OWLET JE IBA POMÔCKOU. NENAHRÁDZA DOHLED DOSPELEJ OSOBY.
- U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPORNOM KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE INTELIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK 3 OD OWLET S VAŠIM LÉKÁROM.
- VŽDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, vysiela a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.

IC

Toto zariadenie vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podľa nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Reklamácie a servis

Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
190 00 Praha 9

Informácie

email: info@irobot.cz
telefón: +420 245 001 740

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30

Riešenie problémov

Základné nastavenia | Alarmy | Pripojenie

Základné nastavenia

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none">■ Pri nastavení nevidím Wi-Fi siet inteligentnej ponožky Smart Sock 3.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňa nie je zapnutá.■ Základňa je už pripojená k Wi-Fi sieti inteligentnej ponožky Smart Sock 3.■ Základňa je mimo dosahu.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňu zapojte do zásuvky.■ Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti. Ak áno, tento krok preskočte a pokračujte v založení vášho účtu v aplikácii.■ Základňu umiestnite bližšie k Wi-Fi routeru.
<ul style="list-style-type: none">■ V aplikácii Owlet nevidím našu domácu Wi-Fi sieť.	<ul style="list-style-type: none">■ Váš router využíva frekvenčné pásmo 5 GHz (výrobok Owlet podporuje iba 2,4GHz pásmo).■ Možno máte skrytý router.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či zariadenie iOS je pripojené k 2,4GHz sieti (väčšina 5GHz routerov podporuje 2,4GHz sieť).■ Pokyny pre skryté routery nájdete na owletcare.com/support.
<ul style="list-style-type: none">■ Základňu nejde pripojiť k domácej Wi-Fi sieti.	<ul style="list-style-type: none">■ Nesprávne heslo■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routeru.■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte heslo k vašej sieti.■ Pred nastavením umiestnite základňu bližšie k routeru a po dokončení nastavenia základňu odnesť späť do detskej izby.■ Skúste reštartovať telefón a znova sa pripojiť k Wi-Fi sieti.■ Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none">■ Základňa po odpojení inteligentnej ponožky Smart Sock svieti bielo.	<ul style="list-style-type: none">■ Prebieha aktualizácia softvéru.	<ul style="list-style-type: none">■ Inteligentnú ponožku Smart Sock opäť pripojte k základni, dokým aktualizácia nebude dokončená.
<ul style="list-style-type: none">■ Základňa nejde spárovať s mojím účtom Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňa a vaše zariadenie iOS nie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.■ Podržanie malého tlačidla „Registrácia“	<ul style="list-style-type: none">■ Overte, či základňa a vaše zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.■ Stlačte a uvoľnite (nedržte) malé tlačidlo „Registrácia“ na spodnej strane základne a zopár sekúnd počkajte, než sa znova pokúsite spárovať váš účet Owlet.■ Vaše zariadenie iOS pripojte k rovnakej 2,4GHz Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojená základňa.

*Potrebujete technickú podporu? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@owlet-care.sk

Alarmy

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> Základňa bliká modro a pípá. 	<ul style="list-style-type: none"> Základňa je mimo dosahu inteligentnej ponožky Smart Sock. Telo rodiča alebo inej osoby starajúcej sa o bábätko blokuje spojenie medzi inteligentnou ponožkou Smart Sock a základňou. To sa bežne stáva pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. Slabá alebo vybitá batéria 	<ul style="list-style-type: none"> Základňu umiestnite bližšie k inteligentnej ponožke Smart Sock. Zmeňte polohu bábätka alebo zväžte, či pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. nevympnete monitorovanie. Nabite inteligentnú ponožku Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> Základňa bliká červeno a pípá. 	<ul style="list-style-type: none"> Nízka alebo vysoká pulzová frekvencia Nízka hladina kyslíka Inteligentná ponožka Smart Sock nesedi na nožičke. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za maličkom. Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje. Môže sa zbytočne spustiť alarm.) Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. Zväžte, či nepoužívate inú veľkosť látkovej ponožky.
<ul style="list-style-type: none"> Základňa bliká žltá a pípá. 	<ul style="list-style-type: none"> Problémy so získavaním údajov Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená. Svetlo v miestnosti je príliš jasné. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za maličkom. Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje a môže sa zbytočne spustiť alarm). Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. Stimte svetlo v miestnosti.

Pripojenie

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> Základňa nie je pripojená k internetu. 	<ul style="list-style-type: none"> Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera. Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje. 	<ul style="list-style-type: none"> Základňu a Wi-Fi router umiestnite bližšie k sebe (zosilňovače Wi-Fi ani ďalšie routery problém nevyriešia). Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none"> Inteligentná ponožka Smart Sock sa nenabíja. 	<ul style="list-style-type: none"> Inteligentná ponožka Smart Sock nie je úplne zapojená. Inteligentná ponožka Smart Sock vyžaduje resetovanie. 	<ul style="list-style-type: none"> Nechajte inteligentnú ponožku Smart Sock nabíjať, dokým sa neozve cvaknutie a nezačne zeleno blikaf. Vypnite a znova zapnite elektronickú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> Namiesto údajov o pulzovej frekvencii a hladine kyslíka vidno pomlčky. 	<ul style="list-style-type: none"> Inteligentná ponožka Smart Sock sa snaží získať spofahlivé údaje. Bábätko príliš pohybuje nožičkou. Nesprávne nasadená inteligentná ponožka Smart Sock Zle padnúca látková ponožka 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v strede okienok látkovej ponožky. Dieťa nedávajte do kolísky ani na vibračnú podložku, mohlo by sa narušiť správne fungovanie zariadenia. Skontrolujte, či je inteligentná ponožka Smart Sock správne nasadená. Skontrolujte, či ste použili vhodnú veľkosť látkovej ponožky.

Tipy pre zdravé prostredie počas spánku

Radi by sme sa s vami podelili o niekoľko tipov, ako bábätku zaistiť zdravý a bezpečný spánok.

- Bábätko by malo byť v postielke samo a ležať na chrbte. Spanie na boku alebo na brušku nie je pre bábätko bezpečné.
- Pre bábätko kúpte postielku, ktorá spĺňa platné bezpečnostné normy. Kúpte aj pevný matrac, ktorý do postielky dobre pasuje a oblečte ho do dobre priliehajúcej posteľnej bielizne.
- Do postielky neumiestňujte žiadne mäkké, voľne ležiace alebo čechraním prevzdušnené predmety. To znamená vankúše, deky, prikrývky, ochranné obloženie do detskej postielky, plyšáky, hračky a všetky mäkké predmety.
- Namiesto klasickej prikrývky použite dojčenskú prikrývku, ktorá sa dá zapnúť ako odev, alebo podobnú prikrývku, ktorá bábätko udrží v teple a bezpečí.
- S bábätkom zdieľajte izbu, ale nie posteľ! Bábätko by malo spať v samostatnej postielke blízko vašej postele. Bude tak v bezpečí a kŕmenie bude jednoduchšie. Keby bábätko spalo s vami, inteligentná ponožka Smart Sock nebude správne fungovať. Vaše telo by totiž rušilo bezdrôtový signál ponožky.
- Dbajte, aby ste s bábätkom nezaspali vo vašej posteli, na pohovke alebo v kresle.
- Nikdy nenechávajte bábätko spať na mäkkom povrchu, napr. v posteli pre dospelých alebo pre deti, na pohovke, v kresle, na vodnej posteli, vankúši, vankúšiku, prikrývke, ovčom rúne a podobných predmetoch.
- Nepoužívajte vankúše, polohovacie klíny ani fixačné podložky na podopretie bábätka, udržanie bábätka na chrbte alebo aby ste mu zabránili v otočení.
- Dbajte, aby sa bábätko nadmerne nezahrialo. Bábätku obliekajte ľahké pyžamko a v miestnosti udržiajte teplotu, ktorá je príjemná pre ľahko oblečeného dospelého.
- Zvážte, či bábätku počas odpoľudňajšieho a večerného spánku nedáte cumlík. Dojčatám cumlík dávajte až vo veku 3-4 týždňov, až si zvyknú na dojčenie.
- O týchto zásadách bezpečného spánku poučte všetkých, ktorí sa budú o bábätko starať!



Prohlášení o shodě

Výrobce: *Owlet Baby Care*
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043
Telefon: 844.334.5330

Výrobek: Owlet Cam
Číslo výrobku: OC1B

Popis výrobku: Owlet Cam umožňuje sledovat a slyšet dítě. Zařízení obsahuje: kameru s vysokým rozlišením a širokým úhlem záběru a zabudovaným mikrofonem, umožňuje obousměrný přenos zvuku, noční vidění, má senzor na měření teploty v místnosti. Balení dále obsahuje magnetickou základnu, napájecí adapter, USB kabel s teplotním senzorem, sadu pro připevnění na stěnu a chrániče na kabely.

Název zástupce: Obelis S.A

Adresa registrovaného zástupce:

Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.
Tel: 32 (0) 2 732 5954
Fax: 32 (0) 2 732 60 03
Email: mail@obelis.net
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení Owlet Baby Care of Lehi, Utah, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
 - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
 - Council Directive 20 1/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
 - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
 - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001)– General Product Safety
 - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021

Tammy Lavery

Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs

